

HEPILOR Collutorio è un dispositivo medico con proprietà specifiche di protezione e riparazione della mucosa buccale. Le sostanze funzionali del dispositivo medico (Zinco-L-Carnosina e Sodio Alginato), grazie alle loro proprietà mucoadesive, aderiscono alla mucosa buccale formando una pellicola che isola e protegge in particolare le zone danneggiate ed infiammate, alleviando la sintomatologia dolorosa e favorendo la naturale cicatrizzazione delle lesioni.

#### COMPOSIZIONE:

Zinco-L-Carnosina, Sodio Alginato Magnesio Idrossido, Glicerina, Sucralosio, Olio Essenziale di Arancio Dolce, Metile p-idrossibenzoato, Acqua depurata

### INDICAZIONI:

- Afte
- · Stomatiti aftose, stomatiti da nicotina o di altro genere
- · Mucositi iatrogene non oncologiche
- Xerostomia
- · Disturbi del gusto di varia origine (disgeusia)
- Sindrome della bocca bruciante
  Gengiviti e Parodontiti
- · Profilassi post-chirurgica, estrattiva ed implantare in odontoiatria
- Profilassi delle lesioni in soggetti portatori di apparecchi e protesi dentarie

### ISTRUZIONI PER L'USO E POSOLOGIA:

Pronto per l'uso.

Effettuare 3-4 sciacqui al giorno con 10 ml di Hepilor Collutorio non diluito. Effettuare lo sciacquo per almeno 2 minuti.

Evitare l'assunzione di cibo e bevande per almeno un'ora dopo lo sciacquo.

La durata del trattamento è a discrezione del medico.

Agitare bene prima dell'uso.

Utilizzare misurino dosatore posto sul tappo del flacone.

Per aprire la confezione è necessario premere con forza il tappo e ruotare contemporaneamente in senso antiorario.

# AVVERTENZE E MISURE PRECAUZIONALI:

- Uso orale
- Non utilizzare in caso di incompatibilità nota con i singoli componenti del prodotto
- In caso di gravidanza, durante la fase di allattamento e nei bambini consultare il medico prima dell'utilizzo
- In caso di disturbi durante l'uso sospendere il trattamento e consultare un medico
- $\cdot \text{ In caso di terapie farmacologiche } \dot{\text{concomitanti}}, \text{ si raccomanda di consultare il medico o il farmacista}$ prima dell'utilizzo del dispositivo medico
- · Non superare la dose giornaliera raccomandata
- · Non usare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione
- La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto integro e correttamente conservato
- Tenere il preparato fuori dalla portata e dalla vista dei bambini
- · Non utilizzare se ipersensibili o allergici ad uno dei componenti

## CONSERVAZIONE:

Conservare in luogo fresco al riparo da fonti dirette di calore. Utilizzare entro un mese dall'apertura.

## EFFETTI INDESIDERATI:


Non sono noti al momento effetti collaterali correlati all'utilizzo di HEPILOR Collutorio.

Lo Zinco-L-Carnosina è generalmente ben tollerato. Nel caso si manifestino effetti indesiderati consultare il medico.

Prodotto senza glutine e senza lattosio

CONFEZIONE: 1 Flacone da 150 ml e più misurino dosatore (dispositivo medico)

CE Dispositivo Medico Data ultima revisione: Aprile 2021

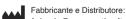

Azienda Farmaceutica Italiana s.r.l. - Via Vibrata, 111 - 64016 - S. Egidio alla Vibrata (TE)

FGL00195500